

Accu-Chek® Mobile zonder teststrips: de nieuwe manier van meten met 50 testen op een tape

▶▶ Test. En de meter doet de rest.

Metten



1 Open het afdekkapje. Schuif dit helemaal naar links tot de meter aangaat.



2 Druk de bedieningsknop helemaal naar beneden om de prikpen aan te spannen. Druk de knop nogmaals in om bloed te prikken.



3 Breng het bloed direct aan in het midden van de gele testzone onder aan de cassette. In 5 seconden verschijnt het resultaat.



4 Sluit het afdekkapje volledig. De gebruikte test wordt veilig opgeslagen in de cassette. Na ongeveer 15 seconden gaat het systeem automatisch uit.

Ontgrendelknop om het cassette compartiment te openen

Bedieningsknop

Display van de prikpen die aangeeft hoeveel lancetten er nog over zijn

Test & Go
Technology



Vervangen van het lancet



U verwisselt het lancet door het hendeltje op de prikpen naar achteren te draaien en weer terug. Het aantal resterende lancetten wordt weergegeven in het display van de prikpen.

Vervangen van de testcassette - na 50 testen



1
Open het afdekkapje. Schuif dit helemaal naar links tot de meter aangaat.



2
Schuif de knop aan de zijkant naar beneden om de deksel van het cassettecompartiment te openen.



3
Verwijder de gebruikte cassette en vervang deze door een nieuwe cassette.



4
Sluit eerst de deksel van het cassettecompartiment en schuif vervolgens het afdekkapje terug.

Vervangen van de lancettenhouder - na gebruik van 6 lancetten



1
Haal het dopje eraf.



2
Verwijder de gebruikte lancettenhouder. De gebruikte lancettenhouder is voorzien van een rode streep en kan niet opnieuw worden gebruikt.



3
Vervang de lancettenhouder door een nieuwe.



4
Plaats het dopje weer terug.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK FASTCLIX and ACCU-CHEK MOBILE zijn handelsmerken van Roche.
© 2009 Roche

www.accu-chek.nl
0800 - 022 05 85
Roche Diagnostics
Postbus 1007
1300 BA Almere

