

Ontdek de enige bloedglucosemeter die alle stukjes samenbrengt

Teststriprolletje plaatsen of vervangen

(Een nieuwe meter wordt geleverd met een dummy striprol)



1 Open het deksel van het compartiment van de striprol.



2 Druk op de rode knop voor het ontgrendelen van het striprolletje.



3 Kantel de meter naar voren waardoor het striprolletje uit de meter valt.



4 Plaats een nieuw teststriprolletje en sluit het deksel. U kunt het teststriprolletje 90 dagen gebruiken. Hierna zijn de teststrips onbruikbaar, omdat er onjuiste meetwaarden kunnen worden verkregen.


De bloedglucose meter



5 Duw voor het starten van de meting de middelste knop omlaag zodat er automatisch een teststrip verschijnt.



6 Houd de meter zo dat de teststrip naar beneden wijst. Breng het bloed aan bij de zwarte inkeping van de teststrip. De teststrip zuigt het bloed op.

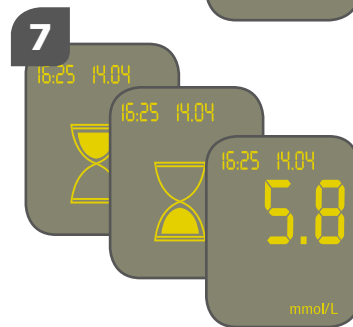

7 Als de teststrip voldoende bloed heeft opgezogen, klinkt het akoestisch signaal (indien ingeschakeld), verdwijnt het teststrip symbool en stopt het bloeddruppel symbool met knipperen. De meting wordt automatisch gestart en op de display verschijnt een zandloper. Het meetresultaat verschijnt na 5 seconden op het scherm.



8 Houd de meter met de teststrip naar beneden boven een afvalcontainer. Duw de middelste knop omlaag om de gebruikte teststrip uit te werpen. De meter schakelt automatisch uit.



De Accu-Chek® Softclix prikpen kan, indien gewenst, van de Accu-Chek Compact Plus worden afgenomen door middel van de schuifknop op de achterkant van de meter.



1 Trek het dopje van de prikpen.



2 Plaats een nieuw lancet in de lancethouder. Deze moet met een hoorbare KLIK worden bevestigd.



3 Draai het beschermkapje van het lancet af.



4 Plaats het dopje weer terug op de prikpen tot deze vastklikt. Let er op dat het gleufje met de witte rand wijst naar het midden van de u-vormige uitsparing op de prikpen.



5 Draai het dopje naar de gewenste prikdiepteinstelling (er zijn 11 instellingen mogelijk).



6 Druk de bedieningsknop van de prikpen helemaal in. De prikpen is nu aangespannen. Let op: span de prikpen pas vlak voor het prikken aan.



7 Plaats de prikpen tegen de gewenste prikplaats. Druk om een bloeddruppel te verkrijgen, de bedieningsknop naar beneden tot deze klikt.



8 Als de meting voltooid is, verwijder het dopje van de prikpen. Houd de prikpen loodrecht boven een afvalcontainer. Druk de bedieningsknop in, het lancet valt uit de prikpen. Plaats de dop terug op de prikpen.

Ontdek wat mogelijk is.

Ga voor meer informatie naar www.accu-chek.nl of bel 0800 - 022 05 85 (gratis).

De Accu-Chek SoftClix Plus is bedoeld voor gebruik bij zelfcontrole door één persoon. De prikpen mag niet worden gebruikt voor het afnemen van bloed bij verschillende personen, omdat hiervoor geen speciale voorziening ter voorkoming van infectiegevaar voor getroffen zijn.

ACCU-CHEK, COMPACT PLUS EN SOFTCLIX zijn handelsmerken van Roche.
© 2010 Roche. Alle rechten voorbehouden.

www.accu-chek.nl
0800 - 022 05 85
Roche Diagnostics
Postbus 1007
1300 BA Almere

