


# Een helder overzicht voor optimaal diabetesmanagement



## Aansluiten

Steek de Accu-Chek Smart Pix in de vrije USB poort van uw computer.

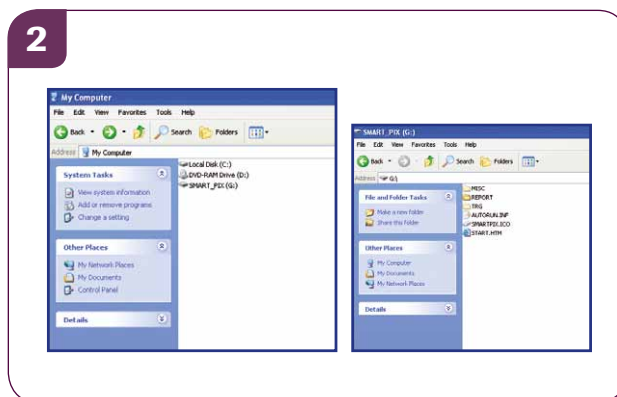

## Starten

Het Accu-Chek Smart Pix icoon verschijnt zodra het apparaat is aangesloten aan de computer

Dubbeklik op het bestand "START HTM".  
Accu-Chek Smart Pix wordt gestart.

*NB. Afhankelijk van de veiligheidsinstellingen van uw computer kan het noodzakelijk zijn "Actieve inhoud" (tijdelijk) toe te staan.*




## Uitlezen

Activeer de gegevensoverdracht van de Accu-Chek bloedglucosemeter of insulinepomp.

Leg de bloedglucosemeter of insulinepomp met het infraroodvenster voor Accu-Chek Smart Pix.

Klik op "Apparaat zoeken" bovenin het Accu-Chek Smart Pix scherm op de computer.

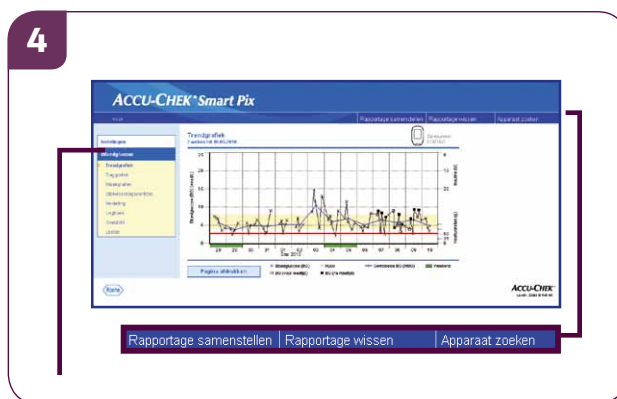

## Weergeven

Gebruik het menu om een rapportage te selecteren

**Rapportage samenstellen:** hiermee kunt u een rapport samenstellen van de door u gewenste grafieken en overzichten.

**Rapportage wisselen:** hiermee kunt u eerder gedownloade data verwijderen.

**Apparaat zoeken:** hiermee activeert u de gegevensoverdracht.

Minimale systeemvereisten: Microsoft Windows 2000 (service pack 4)  
Windows XP/Vista/7. Beeldschermresolutie 1024 x 768.  
Internet Explorer 5 of hoger, FireFox 1.5 of hoger.



### Accu-Chek Pocket Tools: een handige extra toevoeging voor de Accu-Chek Smart Pix

Accu-Chek Smart Pix Pocket Tools is een extra toevoeging voor de Accu-Chek Smart Pix, waarmee u alle bloedglucosewaarden en insuline afgifte snel en overzichtelijk in beeld brengt. Het softwareprogramma is een speciale browser voor de Accu-Chek Smart Pix, die het navigeren en werken met Accu-Chek Smart Pix nog gebruiksvriendelijker maakt.

#### Aanvullende functies op een rijtje:

- Elektronisch dagboek bijhouden
- Rapporten of dagboekbestanden als PDF-bestand opslaan en opnieuw bekijken
- Rapporten of dagboekbestanden per e-mail versturen

Accu-Chek Smart Pix Pocket Tools is exclusief ontwikkeld voor Accu-Chek Smart Pix gebruikers. Het is een toevoeging en geen vereiste voor het gebruik van de Accu-Chek Smart Pix. Accu-Chek Smart Pix gebruikers kunnen Accu-Chek Pocket Tools gratis downloaden op [www.accu-chek.nl](http://www.accu-chek.nl) (registratie verplicht).

#### Ontdek wat mogelijk is.

Kijk voor meer informatie op onze website: [www.accu-chek.nl](http://www.accu-chek.nl)

ACCUCHEK en ACCUCHEK SMART PIX zijn handelsmerken van Roche. © 2010 Roche

[www.accu-chek.nl](http://www.accu-chek.nl)

Roche Diagnostics

Postbus 1007

1300 BA Almere



**ACCUCHEK®**