

# INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN HET HULPSTUK BIJ DE FLACON VOOR EENMALIG GEBRUIK

1. Voordat u druppels in uw oog/ogen doet, wast u beide handen grondig met warm water en zeep.



2. Om de flacon te openen draait u de sluiting er met uw vingers af of gebruikt u de sleuf in het hulpstuk.




3. Plaats de flacon in de daarvoor bestemde ruimte in het midden van het hulpstuk.





4.

4. Kantel uw hoofd achterwaarts. Leg het hulpstuk op uw ooglid zoals hier getoond zodat het gaatje in de zijkant van het hulpstuk naar uw voorhoofd wijst. Trek met de andere hand het onderste ooglid omlaag en knijp om een druppel uit de flacon in het oog te laten vallen. Alleen de oogdruppel komt op het oogoppervlak.

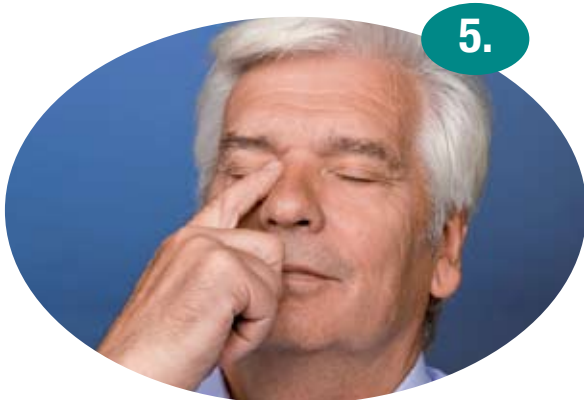

5.

5. Doe uw oog dicht. Druk ongeveer een minuut de traanbuis in uw ooghoek dicht. Veeg vloeistof die op de huid rond het oog is gekomen weg. Herhaal de stappen 4 en 5 voor het andere oog als uw arts dat gezegd heeft. Een flacon voor eenmalig gebruik is genoeg voor beide ogen. Gooi de flacon na gebruik weg. Flacons voor eenmalig gebruik zijn bedoeld voor één dag behandeling en mogen niet de volgende dag gebruikt worden.



Als u uw hoofd niet achterover kunt houden, kunt u ook de oogdruppels liggend indruppelen.

*Bewaar het hulpstuk voor de volgende keer.  
Regelmatig met zachte zeep schoonmaken.*