


Een helder overzicht voor optimaal diabetesmanagement



Aansluiten

Steek de Accu-Chek Smart Pix in de vrije USB poort van uw computer.

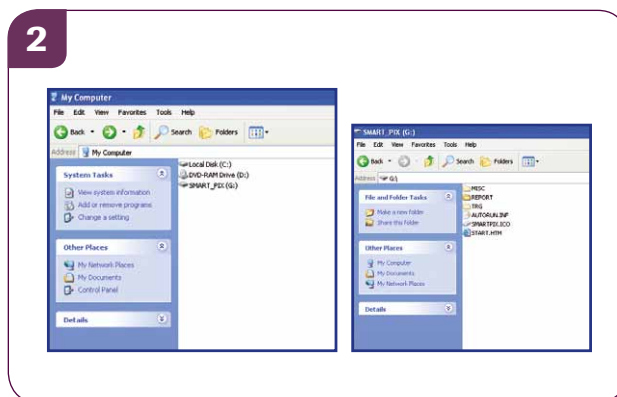

Starten

Het Accu-Chek Smart Pix icoon verschijnt zodra het apparaat is aangesloten aan de computer

Dubbeklik op het bestand "START HTM".
Accu-Chek Smart Pix wordt gestart.

NB. Afhankelijk van de veiligheidsinstellingen van uw computer kan het noodzakelijk zijn "Actieve inhoud" (tijdelijk) toe te staan.




Uitlezen

Activeer de gegevensoverdracht van de Accu-Chek bloedglucosemeter of insulinepomp.

Leg de bloedglucosemeter of insulinepomp met het infraroodvenster voor Accu-Chek Smart Pix.

Klik op "Apparaat zoeken" bovenin het Accu-Chek Smart Pix scherm op de computer.

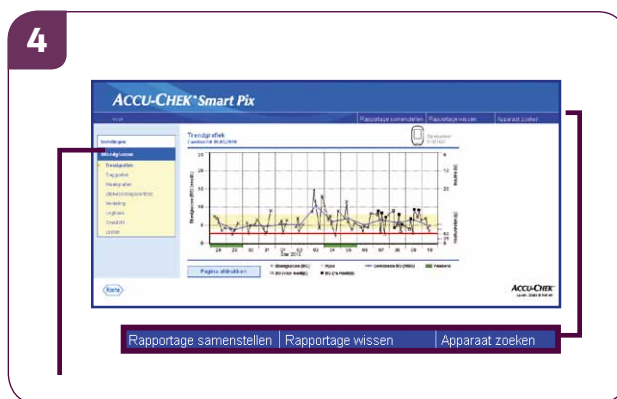

Weergeven

Gebruik het menu om een rapportage te selecteren

Rapportage samenstellen: hiermee kunt u een rapport samenstellen van de door u gewenste grafieken en overzichten.

Rapportage wisselen: hiermee kunt u eerder gedownloade data verwijderen.

Apparaat zoeken: hiermee activeert u de gegevensoverdracht.

Minimale systeemvereisten: Microsoft Windows 2000 (service pack 4)
Windows XP/Vista/7. Beeldschermresolutie 1024 x 768.
Internet Explorer 5 of hoger, FireFox 1.5 of hoger.



Accu-Chek Pocket Tools: een handige extra toevoeging voor de Accu-Chek Smart Pix

Accu-Chek Smart Pix Pocket Tools is een extra toevoeging voor de Accu-Chek Smart Pix, waarmee u alle bloedglucosewaarden en insuline afgifte snel en overzichtelijk in beeld brengt. Het softwareprogramma is een speciale browser voor de Accu-Chek Smart Pix, die het navigeren en werken met Accu-Chek Smart Pix nog gebruiksvriendelijker maakt.

Aanvullende functies op een rijtje:

- Elektronisch dagboek bijhouden
- Rapporten of dagboekbestanden als PDF-bestand opslaan en opnieuw bekijken
- Rapporten of dagboekbestanden per e-mail versturen

Accu-Chek Smart Pix Pocket Tools is exclusief ontwikkeld voor Accu-Chek Smart Pix gebruikers. Het is een toevoeging en geen vereiste voor het gebruik van de Accu-Chek Smart Pix. Accu-Chek Smart Pix gebruikers kunnen Accu-Chek Pocket Tools gratis downloaden op www.accu-chek.nl (registratie verplicht).

Ontdek wat mogelijk is.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.accu-chek.nl

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK SMART PIX zijn handelsmerken van Roche. © 2010 Roche

www.accu-chek.nl

Roche Diagnostics

Postbus 1007

1300 BA Almere



ACCU-CHEK®